

## 1万人以上の ユーザーが実感しました

- ◆ 人前で話す機会が多い仕事をしているのでバネが目立たないスマートデンチャーはとても嬉しい。  
(香川県Y.さん)
- ◆ 夫婦で話し合って、思い切ってスマートデンチャーにしました。友人の評判も大変良いです。主人もスマートデンチャーを入れる予定です。  
(福岡県Mさん)
- ◆ 運動中に前歯を折ってしまいました。若いのでインプラントの選択肢もありましたが手術が怖いのと、費用の面でスマートデンチャーにしました。今では歯がなくなったショックを忘れさせてくれる大切な宝物です。  
(兵庫県T.Oさん)
- ◆ 他人の目を気にしなくなっただけでなく、しっかり咬め、好きな煎餅もバリバリ食べられるようになり、本当によかったです。  
(愛知県S.Nさん)
- ◆ 今までしていた入れ歯と違い、バネと歯との間に食べ物が入らないので、食べやすくなりました。  
(埼玉県Yさん)

※使用感には個人差があります。

●その他ご不明な点は当院スタッフまで

## スマートデンチャーの 取り扱いは簡単!

以下のことを守っていただければ  
末永くお使いいただけます。

### ●スマートデンチャーの着脱方法

入れる時は、はめる場所にそつとあわせ、バネの部分を指で優しく押さえて入れます。はずす時はバネを外に軽く開いて少しずつ外します。



- 食後はやわらかい歯ブラシを使って汚れを軽く洗い流してください。
- 外して保管する際は、入れ歯ケースに保管するだけでOK。水につけておく必要はありません。
- 80℃以上の熱湯に浸けない限り、ほぼ変形することはありません。
- 洗浄にはアルカリ性のもの以外をご使用下さい。「入れ歯爽快」がおすすめです。

歯石除去!  
除菌消臭!



あなたの笑顔を待っている人がいます!



# はじめませんか? 入れ歯のエステ スマートデンチャー



# 保険の部分入れ歯だと…

はずすたびに、バネをかける歯を傷つけてしまいそう…



金具が見えるから話すとき手をあててしまう…



入れ歯特有のにおいがする…  
バネが気になって食べにくい…



…さう、あまりめくってませんか？

Go!

スマートデンチャーなら…

さくられません！



Point 2

奥歯に入れる場合は、しっかり咬めるようにするためにも、見えない部分を金属で補強したものをおすすめします。(金属の支えがないと入れ歯がたわみ、痛みを感じる、割れる等のトラブルが生じやすくなります)



Point 1

歯科用強化プラスチックのバネで、入れ歯が動かないようしっかりと支えてくれます。



Point 3

金属部分にチタンを使用したりイオンコート加工することで身体に優しい入れ歯にできます。



昨日までうつむいていた私…

でも今日からは自信を持って笑えます!



Users Voice

## 金属床の入れ歯 使用者の喜びの声

金属床の入れ歯の入れ心地は素晴らしいです。口の中での一体感があり、舌の動きもスムーズになり、違和感なく話ができるようになりました。日常生活でも無理なく入れておけますし、今まで以上に集中して仕事に打ち込める気力が湧いてきました。

また、スマートデンチャーなので、金属バネが目立たないのも嬉しいです!

これまでの悩みがウソのように解決しました。

福島県 Oさん

金属床の入れ歯は、会話時に舌が当たる部分も薄くできあがっているので、違和感がなく、口の中が広く感じ、咀嚼にも不自由しません。

金属床の入れ歯の良さは快適さです。これは入れた人にしか分からない感覚です。

千葉県 Mさん

金属床の入れ歯は、装着感も良く、今まで使っていた入れ歯と比べ、とても薄く、口の中が広がった感じです。ゴツゴツ感や違和感がなく、自分の歯のような感じがします。以前は、発音時に土台のプラスチックの部分に舌が当たり、違和感がありましたが、今は発音もしやすく、また、食べ物や飲み物の「熱い感じ」と「冷たい感じ」を想像以上に感じる事ができ、毎日の食事がとても楽しくなり、本当に嬉しい限りです。

香川県 Aさん

※あくまでも個人の感想です。全ての方に当てはまる訳ではございません。

The  
Metal  
Plate  
MP

詳しくは当院までお気軽にご相談ください。

HTTP:// [www.labowada.co.jp/](http://www.labowada.co.jp/)

和田精密

検索 

スマートデンチャーには、  
薄くて快適な  
金属床併用が  
お勧めです!



# スマートデンチャーには、薄くて快適な金属床併用がお勧めです!

欠損している歯の少ない小さなサイズのスマートデンチャーであってもお口の中に入ると違和感を感じるのが一般的です。金属床を併用することで、そんな違和感を軽減できるだけでなく、ほかにも様々な利点があります。

## 金属床併用の利点① 薄くて小さく装着感が良い

違和感が少なく、お口の中が広く感じることができ快適です。会話や発音もしやすい。食べ物の温度をよく伝えます。



裏側から厚みを見ると・・・



入れ歯自体の大きさを小さくできます。特に舌の収まる部分を広く確保することができます。

## 金属床併用の利点②

### たわみにくく、しっかり噛める

骨格部分が金属なので、強度があり、しっかり噛みしめられる。

## 金属床併用の利点③


### 残った歯にやさしい

金属床は、保険のプラスチックの入れ歯と比較して、バネのかかった歯を抜かずに済む割合が約1/2というデータもある。

プラスチックのみ

歯を揺らしたり歯や歯ぐきを痛めることもあります



たわむので噛みづらいこともあります

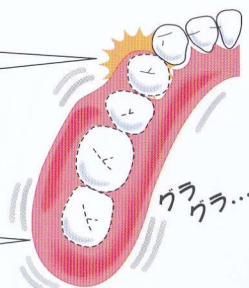

金属床併用  
スマートデンチャー

歯を揺らしにくいので歯にやさしい

たわみにくいからしっかり噛める

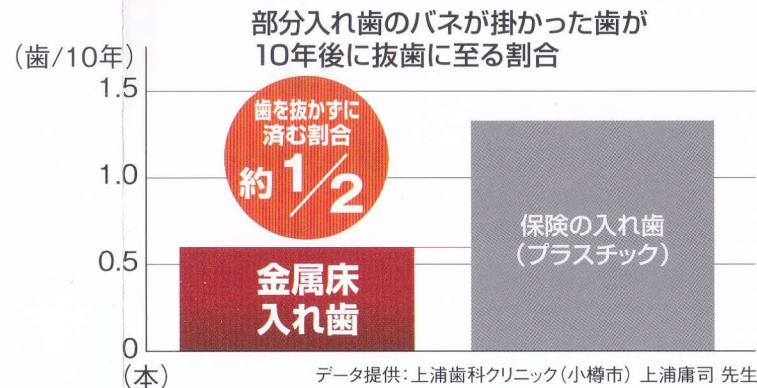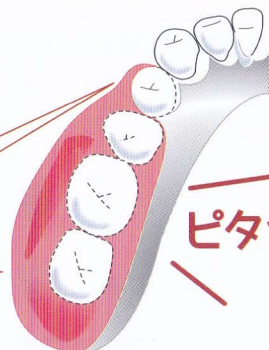

金属床を併用した入れ歯は、  
**「薄く小さく違和感が少なく装着感が良い」**  
**「しっかり噛める」「残った歯や身体にやさしい」**  
 という特徴があります。  
 ご不明な点は、院長、スタッフまでお気軽にお尋ねください。